

Solución a posibles complicaciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Irritación o infección alrededor del estoma	<ul style="list-style-type: none"> ● Exceso de presión del soporte exterior sobre el estoma ● Falta de higiene en la zona del estoma ● Humedad excesiva debajo del soporte 	<ul style="list-style-type: none"> ● Regular la distancia entre el soporte externo y el estoma ● Limpiar y secar cuidadosamente la piel según las recomendaciones indicadas anteriormente. Utilizar una solución antiséptica ● Verificar que el soporte externo esté a la distancia adecuada con el balón, un poco tensionado pero sin presionar <p>Si la irritación persiste, consulte con su especialista de referencia</p>
Obstrucción de la sonda	<ul style="list-style-type: none"> ● La fórmula nutricional o los medicamentos se han secado en el interior de la sonda 	<ul style="list-style-type: none"> ● No introduzca objetos por la sonda ● Pase agua templada (50ml) con la ayuda de una jeringa ● Si la obstrucción persiste consulte a su especialista de referencia
Salida de la sonda PEG o botón	<ul style="list-style-type: none"> ● La sonda se desplaza hacia el exterior por causa accidental, por una maniobra inadecuada 	<ul style="list-style-type: none"> ● No se asuste y consulte a su especialista de referencia en cuanto se dé cuenta del arrancamiento ● No es conveniente esperar mucho tiempo, ya que el estoma se irá cerrando espontáneamente a las pocas horas (5-6h)
La sonda PEG o botón no giran	<ul style="list-style-type: none"> ● La sonda se ha adherido al tejido 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gire con fuerza la sonda empujando hacia dentro ● Si no consigue despegarla, consulte a su especialista de referencia
Náuseas y vómitos	<ul style="list-style-type: none"> ● Posición incorrecta del paciente ● La fórmula de nutrición enteral pasa demasiado rápido ● Causas debidas a la dieta y/o medicación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque al niño en la posición correcta incorporándolo 30-45° ● Detenga la nutrición de 1 a 2 horas. Reinicie la nutrición transcurrido este tiempo, y si las náuseas o vómitos persisten, detenga la nutrición ● Revise las pautas de administración de la alimentación y de la administración de medicamentos <p>Si persisten cualquiera de los problemas antes mencionados, consulte a su especialista de referencia</p>
Diarrea	<ul style="list-style-type: none"> ● La fórmula nutricional pasa demasiado rápido ● La fórmula nutricional está demasiado fría ● Medicación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Detenga la nutrición de 1 a 2 horas. Reinicie la nutrición transcurrido este tiempo y si persiste la diarrea, consulte a su especialista de referencia ● Administre la fórmula nutricional a temperatura ambiente ● Consulte a su especialista de referencia
Estreñimiento	<ul style="list-style-type: none"> ● Inmovilidad ● Falta de hidratación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si es posible, pasear un poco ● Siga las normas de hidratación adecuadas <p>Si persiste el estreñimiento, consulte a su especialista de referencia</p>
Heridas en la piel	<ul style="list-style-type: none"> ● Tener fijada la sonda con esparadrapos siempre en el mismo lugar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Protegerla mediante apósitos hidrocoloides, que facilitan la curación de la piel y se puede colocar la sonda encima